


Para asegurar la efectividad de la mascarilla, se debe usar correctamente y **en el caso de los niños, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas debe ser supervisada por un adulto.** 🔍



1 Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.

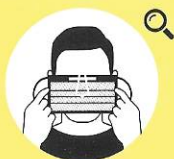

2 Identificar la parte superior de la mascarilla. Posicionar la mascarilla en la cara a la altura de la nariz. Si se dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.



3 Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.



4 Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.



5 Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz (si existe). **Verificar que la mascarilla está colocada correctamente** y que no se observan molestias respiratorias.



6 Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



Mascarilla higiénica certificada

UNE 0065 / 2020

ANTIBACTERIANO



TRANSPIRABLE



IMPERMEABLE



- Eficacia en la filtración de aerosoles >98%
- Eficacia en la filtración de partículas >94% 0.3 MICRAS
- Transpirabilidad: <26 Pa/cm² aprox.
- Tejido: UNE-EN14683 / Hidroblock 100% Algodón
- **Mantiene sus propiedades durante 65 lavados**
- **Reutilizable**

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.

B-58311614 · ESPAÑA

No se admiten devoluciones

Instrucciones de uso

Uso de la mascarilla

La mascarilla higiénica no exime al usuario de aplicar las medidas de distanciamiento social esenciales según las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

NOTA: Las medidas de protección colectiva son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

Para evitar la contaminación al retirar la mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Si se va a reutilizar, se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
6. Eliminación de la mascarilla: Una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar, en un contenedor provisto de una bolsa de plástico.

Por cuestiones de higiene se recomienda lavar después de su uso.



Certificado ITEL / ref. CE-11304

Lavado y secado de la mascarilla

Para mantener las propiedades del tejido durante 65 lavados, el lavado y secado de la mascarilla debe ser acorde con las recomendaciones del fabricante.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h. posteriores al lavado.

Lavado a mano (recomendado):

En un recipiente adecuado, sumergir la prenda en agua tibia con detergente neutro durante 15 minutos. Enjuagar muy bien y secar en secadora si es posible.

Lavado a máquina:


Utilizar ciclo para ropa delicada con detergente neutro. Secar en secadora si es posible.

Importante: Se recomienda planchar la **parte interna** a 150°C para reactivar las propiedades hidrófugas del tejido.

Se recomienda lavar antes del primer uso.



Instrucciones para versión con regulador (solo adultos)

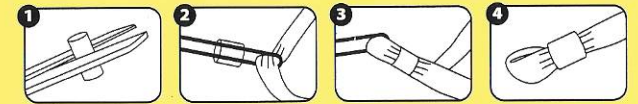

* Complemento salva orejas opcional (solo adultos)